

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://coagulometer.nt-rt.ru/> || [crh@nt-rt.ru](mailto:crh@nt-rt.ru)

## Набор реагентов



## МЛТ-ПАП-ДИФФ

Набор реагентов предназначен для окраски гинекологических препаратов по Папаниколу при цитологической диагностике и скрининге по Папаниколу («ПАП-тест»).

Набор реагентов «МЛТ-ПАП-ДИФФ» предназначен для окраски гинекологических препаратов по Папаниколу при цитологической диагностике и скрининге по Папаниколу («ПАП-тест»). Набор доступен в трёх комплектациях, рассчитан на окраску не менее 1000 препаратов в любой из комплектаций.

Просветляющий раствор не содержит ксилол.

Набор может использоваться как для окраски традиционных мазков, так и для окраски препаратов после жидкостной пробоподготовки.


При производстве применяется многостадийный контроль качества, в том числе – конечная проверка на модельных препаратах. Реагенты длительное время тестировались в ведущих клиниках России.

**Методика «ПАП-ДИФФ», рекомендованная при окрашивании гинекологических мазков с использованием набора реагентов «МЛТ-ПАП-ДИФФ»\*\***


№	Процесс (реагент)	Длительность процесса
1	Фиксация (фиксатор-спрей)	15 мин
2	Промывка (водопроводная вода)	30 сек
3	Промывка (дистиллированная вода)	5 сек
4	Окрашивание (краска гематоксилин по Гиллу-2 (Папаниколау-1))	3 мин
5	Отсинивание (водопроводная вода)	2 мин
6	Промакивание (фильтровальная бумага)	-
7	Окрашивание (краска OG (Папаниколау-2)/ Концентрат краски OG (Папаниколау-2))	15 сек
8	Промакивание (фильтровальная бумага)	-
9	Ополаскивание (раствор для дегидратации, первый сосуд)	10 сек
10	Промакивание (фильтровальная бумага)	-
11	Окрашивание (краска EA (Папаниколау-3)/ Концентрат краски EA (Папаниколау-3))	3 мин
12	Промывка (водопроводная вода)	2 сек
13	Промакивание (фильтровальная бумага)	-
14	Дегидратация (раствор для дегидратации первый сосуд)	10 сек
15	Промакивание (фильтровальная бумага)	-
16	Дегидратация (раствор для дегидратации, второй сосуд)	10 сек
17	Дегидратация (раствор для дегидратации, третий сосуд)	10 сек
18	Просветление (просветляющий раствор)	10 сек
19	Заключение под покровное стекло (монтирующая (закрывающая) среда)	

\*\* Оптимальная длительность выдержки в реагентах может зависеть от пробоподготовки.

## Традиционный мазок

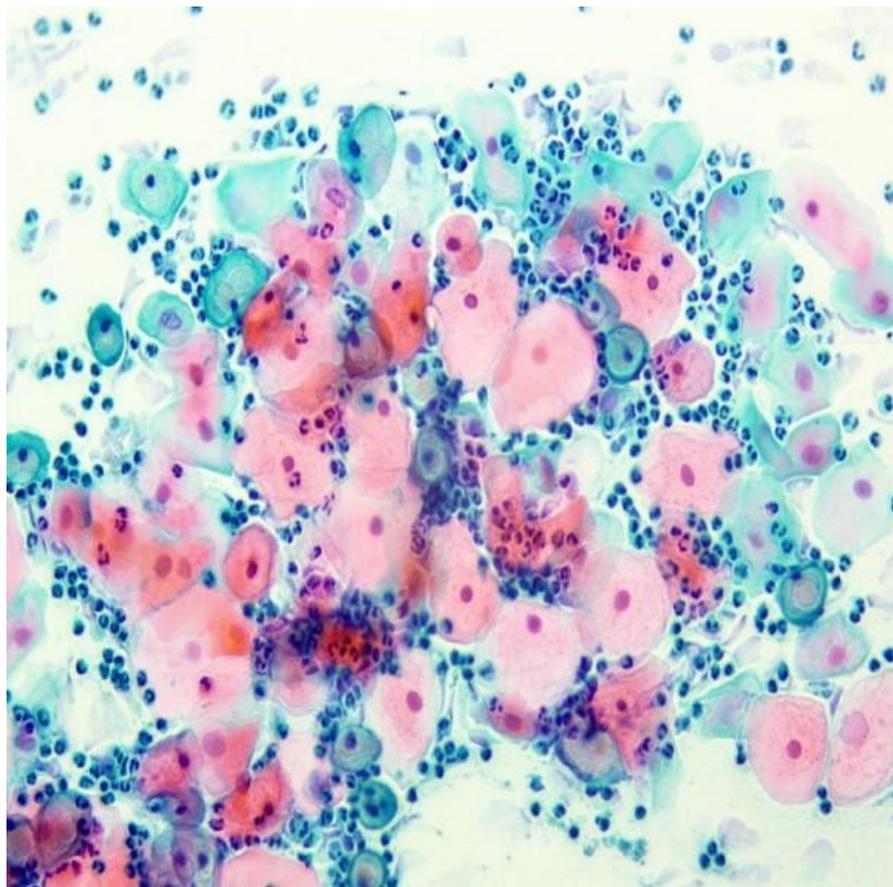

## Жидкостная цитология

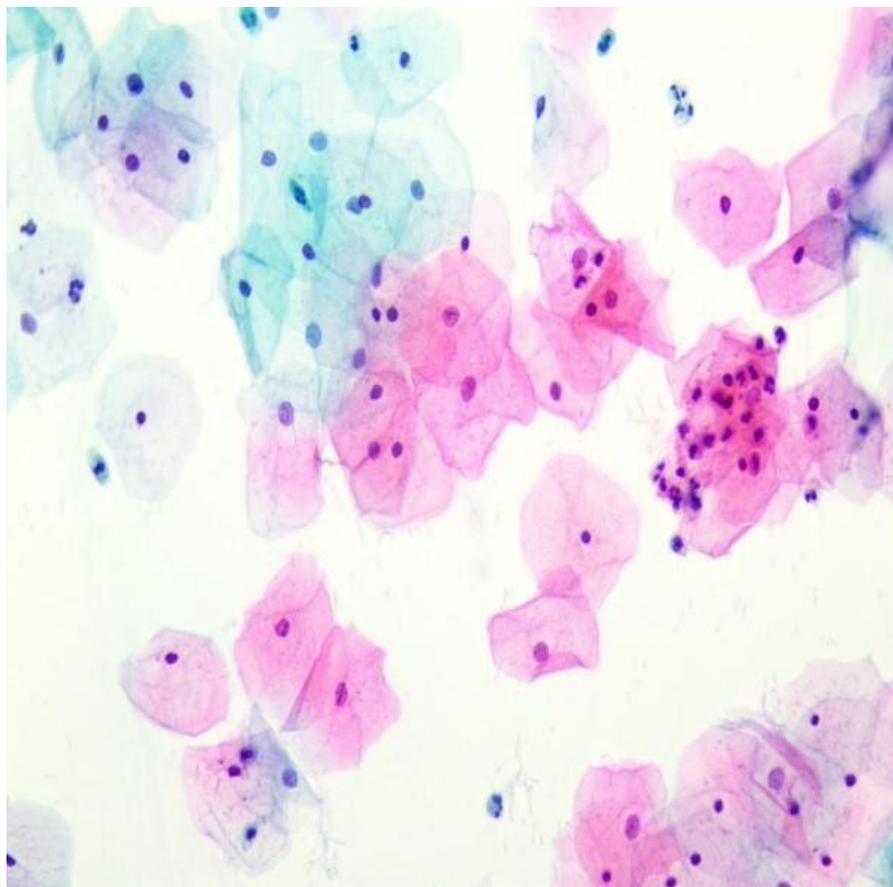

**Комплектация**

№	Реагент	Комплектация 1	Комплектация 2	Комплектация 3
1	Краска гематоксилин по Гиллу-2 (Папаниколау-1)	1000 мл - 1 шт.	1000 мл - 1 шт.	1000 мл - 1 шт.
2	Краска ОГ (Папаниколау-2)	1000 мл - 1 шт.	190 мл * - 1 шт.	1000 мл - 1 шт.
3	Краска ЕА (Папаниколау-3)	1000 мл - 1 шт.	260 мл * - 1 шт.	1000 мл - 1 шт.
4	Раствор для дегидратации			1000 мл - 3 шт
5	Просветляющий раствор			1000 мл - 1 шт.
6	Фиксатор-спрей			100 мл - 2 шт.
7	Монтирующая (закрывающая) среда			100 мл - 1 шт.

\*Концентраты красок (разбавляются пользователем).

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://coagulometer.nt-rt.ru/> || [crh@nt-rt.ru](mailto:crh@nt-rt.ru)